

INSTRUCCIONES DE USO

CAJA QUIRURGICA



Composición:

La caja quirúrgica TRP está fabricada en Acero Inoxidable 304.

Advertencias:

Uso sólo apto Profesional

Producto No estéril - Esterilizar antes de usar.

La caja quirúrgica TRP es apta para esterilización en AUTOCLAVE o ESTUFA. Siga las instrucciones del manual del Autoclave o Estufa.

Atención: Las siliconas, donde se asienta el instrumental, soportan una temperatura máxima de 250 °C.

Precauciones:

Lea las instrucciones antes de usar - La vida útil de este producto depende de una correcta limpieza y esterilización.

La caja quirúrgica, al igual que el instrumental contenido en ella, debe estar completamente limpio antes de su esterilización.

No es admisible el método de esterilización "flash". Tampoco utilice esterilización por aire caliente, por irradiación, por plasma, por formaldehído u óxido de etileno.

Instrucciones de Uso:

Una vez abierta la caja, colocar en la bandeja los elementos que se desee esterilizar; una vez hecho esto, colocar de nuevo la tapa y cerrar la caja, proceder entonces a la esterilización.

Atención: Evite el contacto de la caja quirúrgica metálica TRP con productos químicos como solventes etc., ya que éstos pueden dañarla.

Limpieza:

Los restos de materia orgánica deben ser eliminados previamente en un baño de ultrasonido, utilizando jabón enzimático (mínimo 3 enzimas) diluido, siguiendo las instrucciones del fabricante. Después, lavar en agua corriente; en caso de observar presencia de residuos, repetir el procedimiento; en caso de que persistan, proceder a la limpieza manual.

Desinfección:

Seleccionar un desinfectante de eficacia probada, compatible con el jabón enzimático utilizado en el proceso de limpieza.

Realizar la desinfección, respetando las concentraciones y tiempos de actuación indicados por el fabricante del desinfectante.

Utilizar solo disoluciones recién preparadas.

Esterilización:

Luego de la limpieza y desinfección, colocar el producto en una bolsa o pouch para esterilización. La esterilización deberá hacerse en AUTOCLAVE, a una temperatura entre 121° C y 136° C, o en ESTUFA a una temperatura de 180 °C. Repetir el proceso después de cada uso.

IMPORTANTE:

Realice la esterilización siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante del esterilizador. Le aconsejamos VALIDAR periódicamente el funcionamiento del autoclave o estufa a utilizar.

Algunas recomendaciones para Autoclaves Horizontales y Verticales: Utilizar siempre las gradillas que vienen provistas con los autoclaves.

Horizontales: No dejar nunca la caja en contacto directo o muy cerca de las paredes laterales de la cámara del autoclave. Las resistencias calefactoras suelen instalarse allí por lo que las temperaturas próximas a las paredes son sensiblemente más altas de los 136° C (temperatura máxima recomendada), lo que podría poner en riesgo la integridad de la caja

Verticales: La caja no deberá quedar nunca apoyada en el fondo de la misma que es donde se encuentra la resistencia.

Conservación: Conservar el producto en un lugar limpio y cerrado protegido del polvo y la suciedad.

Fabricante: TORMICRON SRL

Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2576, San Justo, Pcia. Bs.As.

Argentina TE. 3969-4049 www.Tormicron.com.ar

info@tormicron.com.ar

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Director Técnico: Sergio Víctor Dyner MP-18989

Autorizado por la ANMAT PM-2232-2

Confeccionó: R.A.B.

Revisó: M.D.R

Aprobó: J.L.D.R.

Fecha de Emisión: 25/01/21

Revisión N.º 0

PÁGINA: 1 de 1